



บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด

Ultimate Plus Supply Co., Ltd.

219/230 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 6 (ชั้นเขต 2/6) ถ.งามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 02-591-4005 , 02-591-4052 แฟกซ์. 02-591-4027 , 02-591-4028 E-mail : data@ultimateplus.co.th www.ultimateplus.co.th

เข็มขัดพยุงหลัง (BACK SUPPORT)



รหัสสินค้า: 78UPSDL

ยี่ห้อสินค้า: DELIGHT

รายละเอียดสินค้า:

- เข็มขัดพยุงหลัง D-Light แขนพยุงหลัง (STAY) ผลิตจาก POLYPROPYLENE RASIN มีทั้งหมด 6 แถง
แข็ง 4 แถง อ่อน 2 แถง
- บรรจุอยู่ในซองพลาสติกซิปปไลและบรรจุลงในกล่องอีกครั้ง
- มีขนาดให้เลือก
 - #S=20-26"
 - #M=26-32"
 - #L=32-38"
 - #XL=38-44"
 - #XXL=44"UP
- เข็มขัดพยุงหลัง ใช้สำหรับ ป้องกันและบรรเทาอาการปวดหลัง จากโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน
ทับเส้นประสาทหรือการปวดกล้ามเนื้อ
- ตลอดจนเส้นเอ็นบริเวณหลัง อันมีสาเหตุจาก การอยู่ในอิริยาบถประจำวัน ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การยกของ
ด้วยท่าที่ไม่ถูกต้อง การนั่งขับรถ การนั่งทำงาน การนั่งสมาธิ เป็นเวลานานใน ท่าที่ไม่ถูกต้อง การนั่งขับ
รถ การนั่งทำงาน การนั่งสมาธิ เป็นเวลานานในท่าที่ไม่ถูกต้อง



- ตลอดจนการเล่นกีฬาบางชนิดที่ต้องการเคลื่อนไหวส่วนเอวและแผ่นหลังเช่น ดิกอล์ฟ การเดินแอร์โรบิก การบริหารร่างกาย
- เข็มขัดพยุงหลัง จะช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวที่ผิดลักษณะของ โครงสร้างแผ่นหลัง และช่วยให้ท่านอยู่ในอิริยาบถที่ถูกต้องเสมอ

รายละเอียดคุณสมบัติสินค้า (Specification)

- ผ้ายางยืดอย่างดีชั้นใน (ELASTIC HIGH GRADE) ผลิตจาก POLYESTOR ทอเป็นริ้ว ซึ่งระบายอากาศได้ดี เหมาะสำหรับใส่ทำงาน ในเมืองร้อน
- ผ้ายางยืดชั้นนอก (ELASTIC HIGH GRADE) สามารถยืดได้ 85% (+_10%) จึงมีความทนทานและอายุงาน งานนานกว่า
- แขนพยุงหลัง (STAY) ผลิตจาก POLYPROPYLENE RASIN มีความทนทานสูง
- แผ่นแปะยึด (FASTENER) "VELCRO" สามารถแปะยึดและแกะออกได้มากกว่า 7,000 ครั้ง

วิธีการใช้ Back Support

มีส่วนประกอบ 2 ชั้น คือ ส่วนที่เป็นเข็มขัดรัดบริเวณเอวและสายรัดไหล่ ซึ่งประกอบ ทั้ง 2 ชั้น สามารถปรับได้เพื่อให้เหมาะสม แผ่นหลังของผู้สวมใส่ การสวมเข็มขัดพยุงหลังให้ปฏิบัติ

1. สวมแผ่นพยุงหลัง โดยให้ส่วนที่มีแกนเสริมอยู่ด้านหลัง ปรับสายรัดไหล่ให้เข็มขัดอยู่ระดับเอว
2. ดึงแถบยึดที่เข็มขัดชั้นในด้านหน้าให้แน่นกระชับ ถ้ายังไม่พอดีให้ปรับที่แถบยึดด้านหลังซึ่งสามารถ ปรับได้ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา

การทำความสะดวกและดูแลรักษา

1. เมื่อสกปรก หรือเปื้อนสามารถซักล้างด้วยผงซักฟอก ตากแดดได้ตามปกติ
2. ไม่ควรเก็บไว้ในที่อุณหภูมิความร้อนสูงจะทำให้ใยยางยืดเสื่อมสภาพ
3. ห้ามรีดด้วยเตารีด หรือถูกสะเก็ดไฟ เพราะเนื้อผ้าทำจากโพลีเอสเตอร์ ไวต่อความร้อนสูง